

# UV Oftal

Soluzione Oftalmica Lubrificante Fotoprotettiva

lo stress ossidativo indica l'insieme delle reazioni che si producono nelle cellule, nei tessuti e nelle macromolecole biologiche quando vengono esposte ad un eccesso di agenti ossidanti, sia di tipo endogeno che di tipo esogeno, come ad esempio fonti luminose artificiali e naturali.

Il corretto equilibrio è essenziale in quanto numerosi processi sono estremamente sensibili alle alterazioni di quest'ultimo, con conseguente disfunzione, danno cellulare necrosi o apoptosi.

I sistemi enzimatici a più elevata antiossidante sono rappresentati, ad esempio, dalla Superossido dismutasi (SOD).

L'occhio, a causa della sua struttura e della sua posizione anatomica, è in perenne contatto con la luce e rappresenta uno degli organi che più subisce l'azione dei radicali liberi, in maniera diretta e indiretta a livello della cornea, del cristallino, del vitreo e della retina.

L'esposizione alle radiazioni luminose determina un aumento della fisiologica concentrazione di ROS (radicali liberi), responsabili di reazioni ossidative corneo congiuntivali. A tale livello, i processi ossidativi vedono come bersaglio i cheratociti, i fibroblasti e le cellule epiteliali della congiuntiva.

## **Indicazioni:**

Lubrificante, Idratante, antiossidante con conseguente attività fotoprotettiva sulla superficie oculare. UV Oftal è un Medical Device indicato nelle situazioni di stress oculare da fonti luminose quali radiazioni solari (UVA/UVB/UVC, VIS,IR) o laser dopo intervento di chirurgia refrattiva.

## **Composizione:**

Estratto secco di Triticum Vulgare titolato in SOD (min. 400.000 U/g), carbossimetilβ-glucano, PVM/MA copolimero sale sodico, fosfolipidi da soia, polisorbato80, EDTA sale bisodico, N-idrossimetilglicinato sodico, soluzione isotonica tamponata a pH 7,00.

## **Modalità d'uso:**

Applicare 1 o 2 gocce preferibilmente 15-20 minuti prima dell'esposizione alla fonte luminosa e se necessario, a scopo lenitivo, ripeterla ad esposizione terminata.

## **Controindicazioni:**

Non sono note controindicazioni.

## **Avvertenze:**

- Non utilizzare il prodotto se allergici ad uno qualsiasi dei componenti.
- In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare Il medico.

- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla scatola e sul flacone. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.
- Non utilizzare il prodotto dopo 60 giorni dall'apertura.
- Non ingerire.
- Il prodotto è sterile fino all'apertura del flacone.
- Prestare attenzione affinché la punta del flacone non entri in contatto con l'occhio, per evitare eventuale contaminazione.
- Non utilizzare se la confezione non si presenta integra.

**Conservazione:**

- Tenere lontano dalla vista e dalla portata dei bambini.
- Conservare il prodotto ad una temperatura non superiore a 25° C
- Richiudere bene il flacone dopo l'uso.

**10 ml e**

Distributore: 360 Oftal Srl,  
Via Lombardia 6/b, 90144 Palermo, IT  
Fabbricante: Italdevice Srl-Via Laurentina Km 26.700-  
00071 Pomezia (RM) Italia

**CE:** 0425 STERILE A